
口唇閉鎖力測定器（リップデカム） LDC-120データ管理ソフト インストール手順書



口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

☆☆☆☆☆☆☆☆

目 次

☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 動作環境の確認	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 頁
2.LDC-120 ドライバーのインストール	・・・・・・・・・・・・・・・・	4 頁
3.LDC-120 管理ソフトのインストール	・・・・・・・・・・・・・・・・	6 頁
3.1 ソフトウェアのインストール	・・・・・・・・・・・・・・・・	6 頁
3.1.1 Microsoft .NET Framework4		
のインストール	・・・・・・・・・・・・・・・・	6 頁
3.1.2 LDC-120 管理ソフトのインストール	・・・・・・・・・・・・・・・・	7 頁
4.改版履歴	・・・・・・・・・・・・・・・・	11 頁

口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

ドライバー及びソフトのインストールの前に動作環境の確認をします。

1. 動作環境

OS: Windows7(32bit,64bit)、Windows8(32bit,64bit)、Windows10(32bit,64bit)


画面解像度: 1024x768以上

ハードディスク容量: 200MB(患者データは除いた容量)

2. 動作環境の確認



・Windows7の動作環境の確認方法

①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、左クリックしてください。

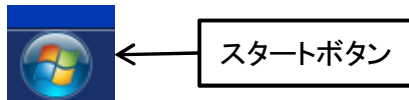

②下記左画像の表示が出ますので、「コンピューター」の項目に合わせて1回右クリックしてください。

下記右画像の表示の「プロパティ(R)」の項目に合わせて1回左クリックしてください。

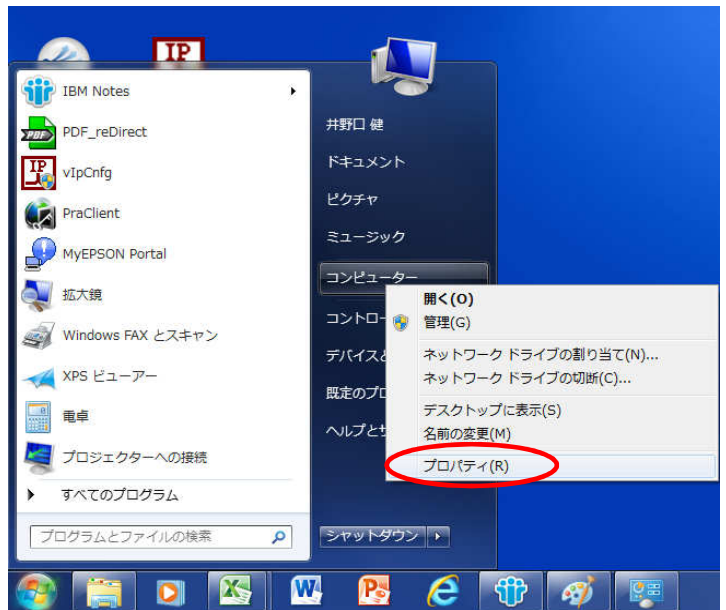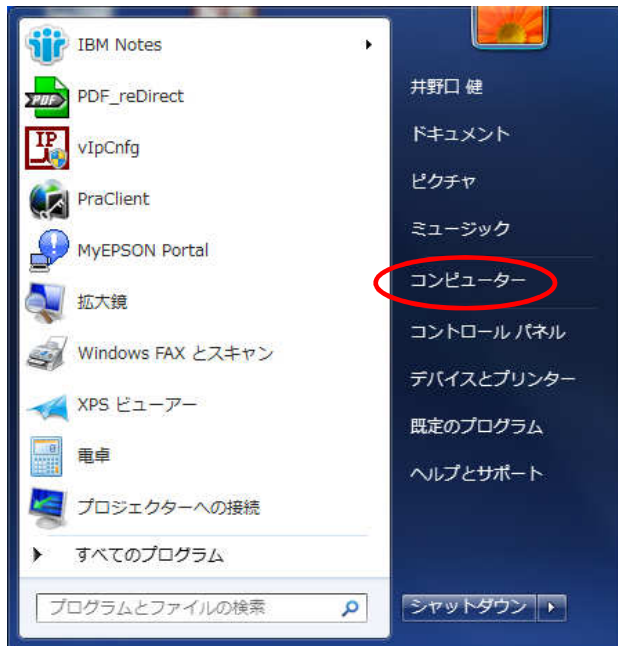


③下記画像の表示が出ますので、**赤字**で囲ってある箇所を確認してください。(インストールの時のデータファイルの選択時に必要です。)




口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

・Windows8の動作環境の確認方法

①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、右クリックしてください。

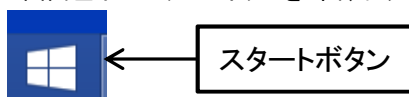

②下記画像の表示が出ますので、「システム(Y)」の項目に合わせて1回左クリックしてください。

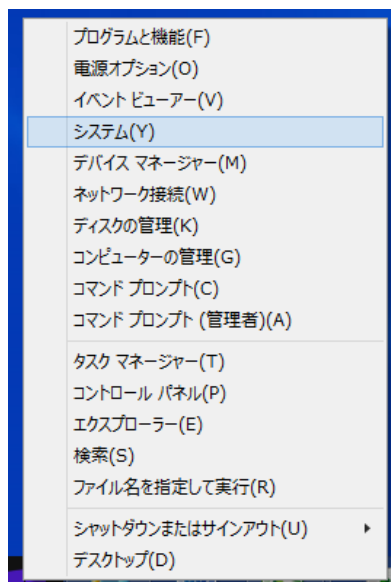


③下記画像の表示が出ますので、**赤字**で囲ってある箇所を確認してください。(インストールの時のデータファイルの選択時に必要です。)



口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

・Windows10の動作環境の確認方法

①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、右クリックしてください。

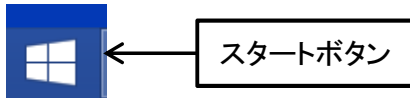

②下記画像の表示が出ますので、「システム(Y)」の項目に合わせて1回左クリックしてください。




③下記画像の表示が出ますので、**赤枠**で囲ってある箇所を確認してください。(インストールの時のデータファイルの選択時に必要です。)




口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

3.LDC-120 ドライバーのインストール

①コスモ計器HPより「USBドライバー」の圧縮データをダウンロードすると、下記の画面になります。

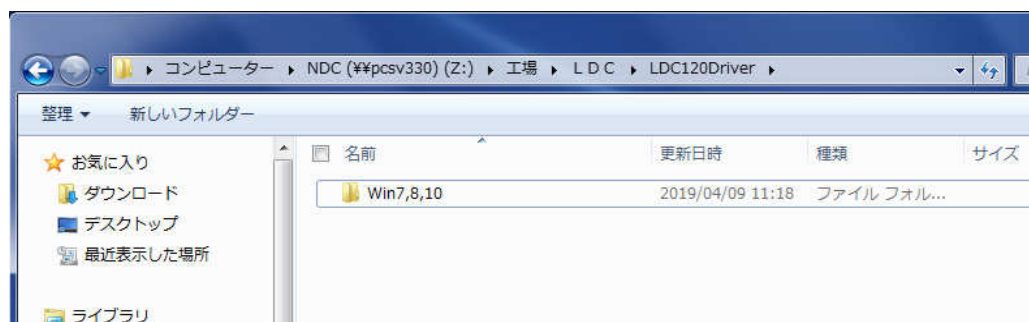

②「Win7,8,10」フォルダをダブルクリックして下記画面を開いてください。

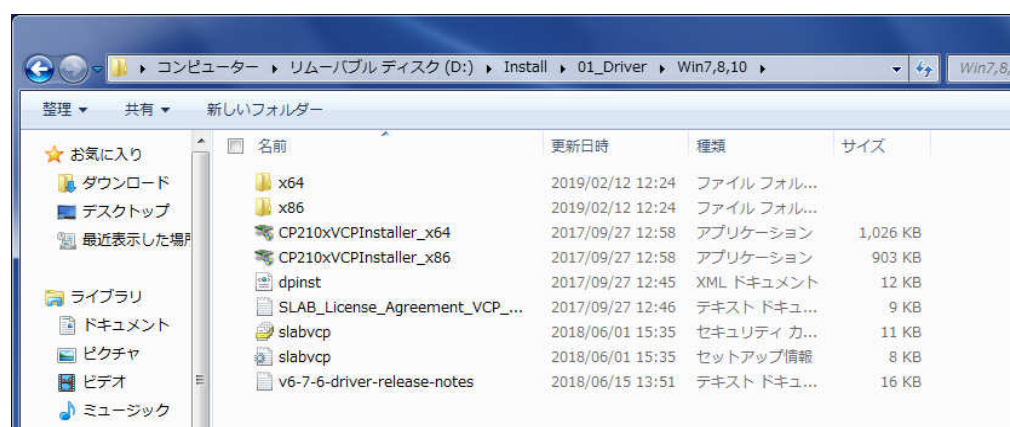

③ 2 動作環境の確認方法で確認した「システムの種類」のバージョンによって下記に示すファイルをインストールしてください。


- ・64ビット オペレーティングシステムの場合・・・「CP210xVCPInstaller_x64」ファイルをダブルクリック
- ・32ビット オペレーティングシステムの場合・・・「CP210xVCPInstaller_x86」ファイルをダブルクリック

上記の作業をすると「ユーザー アカウント制御」という画面が開いて、コンピューターの変更の許可についての確認がありますので、「はい」を押して、下記画面を開いてください。その後、**赤枠**の「次へ」ボタンを押して、次の画面に進んでください。



口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

下記画面の「使用許諾契約」が開いたら、**赤丸**の「同意します(A)」の項目にチェックをしてから**赤枠**の「次へ」ボタンを押して、次の画面に進んでください。

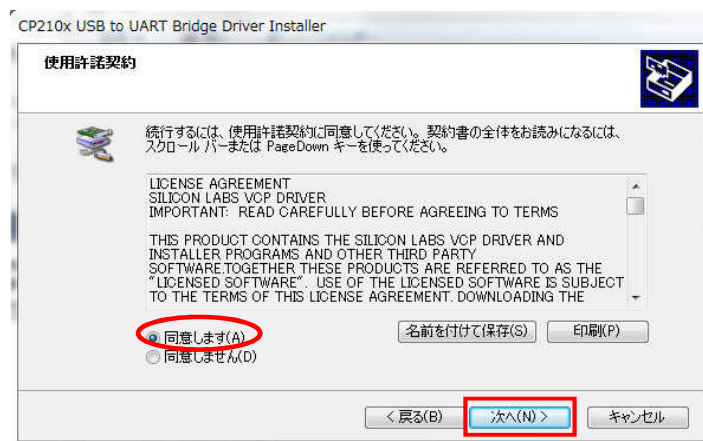

ドライバーのインストールの完了画面が開きますので、**赤枠**の「完了」ボタンを押して、作業を完了してください。




口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

3.管理ソフトのインストール

3.1 ソフトウェアインストール


3.1.1 Microsoft .NET Framework 4のインストール

- ①コスモ計器HPより「ソフトウェア」の圧縮データをダウンロードすると、下記の画面になります。
- ②**赤枠**の「01_.net Framework」フォルダをダブルクリックして下記画面を開いてください。

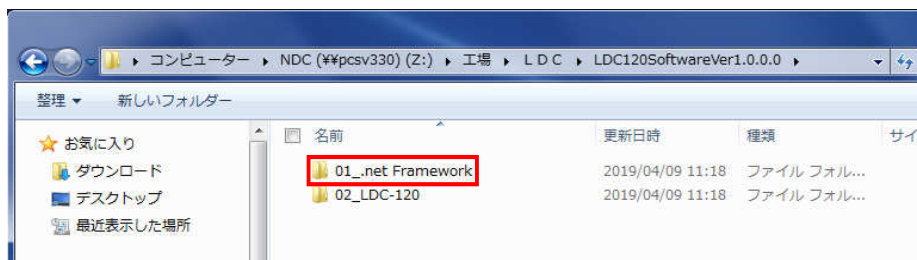


- ③「日本語」フォルダをダブルクリックして下記画面を開いてください。

その後「Microsoft .NET Framework 4 Japanese dotNetFx40_Full_x86_x64」ファイルをダブルクリックしてプログラムをインストールしてください。

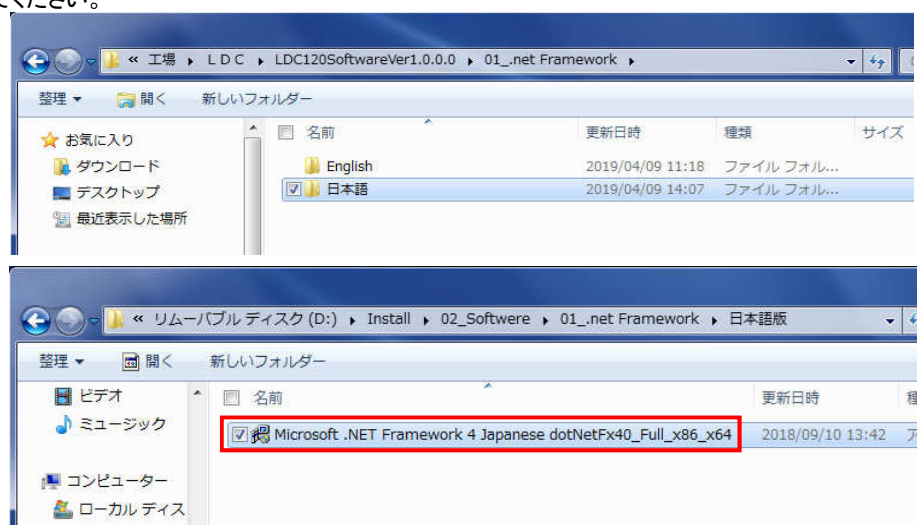


※既に「Microsoft .NET Framework 4 Japanese dotNetFx40_Full_x86_x64」ファイルがPC内にインストールされている場合、下記画面のようなメッセージが出ます。その場合は画面を閉じて、次の作業に移ってください。

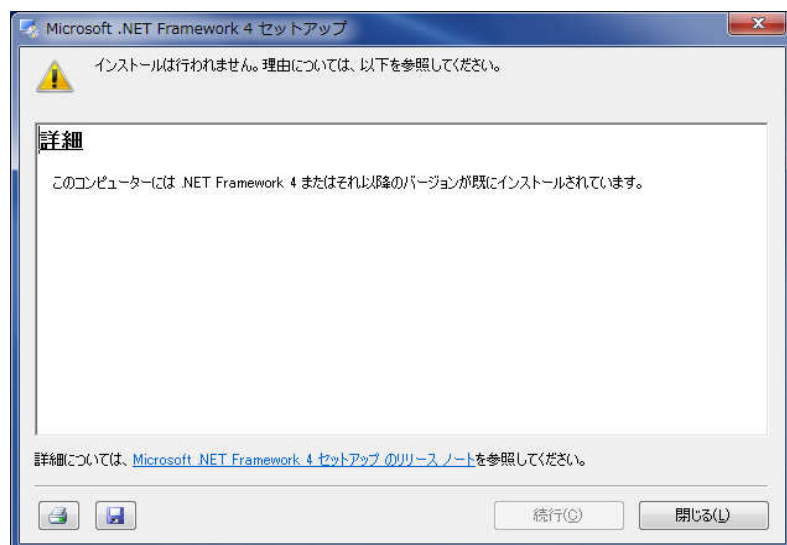


口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

3.1.2 LDC-120ソフトウェアのインストール

- ① 赤枠の「02_LDC-120」フォルダをダブルクリックして次の画面を開いてください。

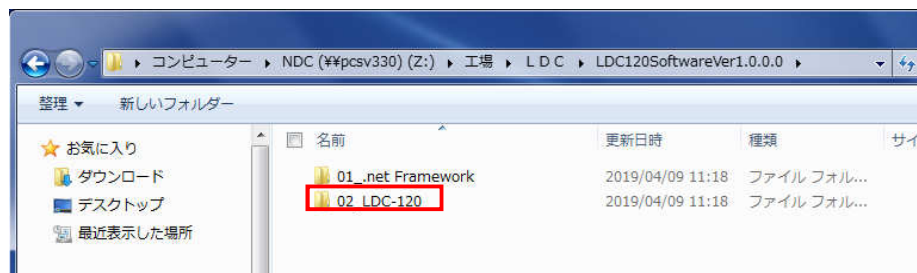


- ② 赤枠の「日本語」フォルダをダブルクリックして、次の画面を開いてください。

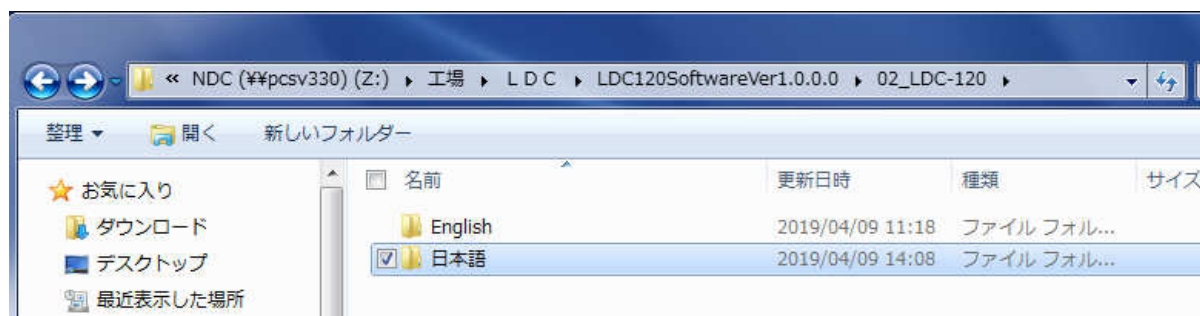



口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

③「LDC-120」フォルダをコンピューターの「C:¥」ファイル内に丸ごとコピーします。

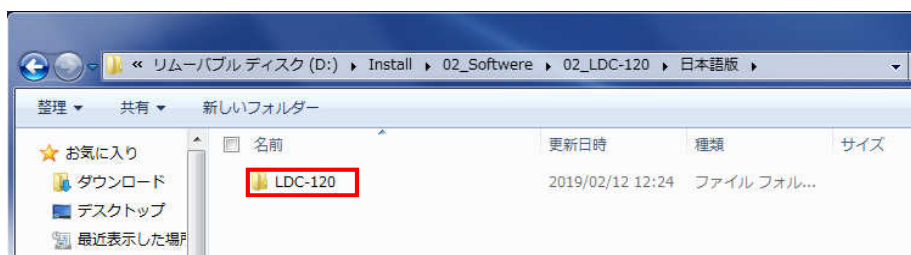

④「LDC120」フォルダをクリックすると下記画面となります。

「LDC120」ファイルを右クリックし、「ショートカットの作成」を左クリックして、「LDC120-ショートカット」ファイルを作成してください。

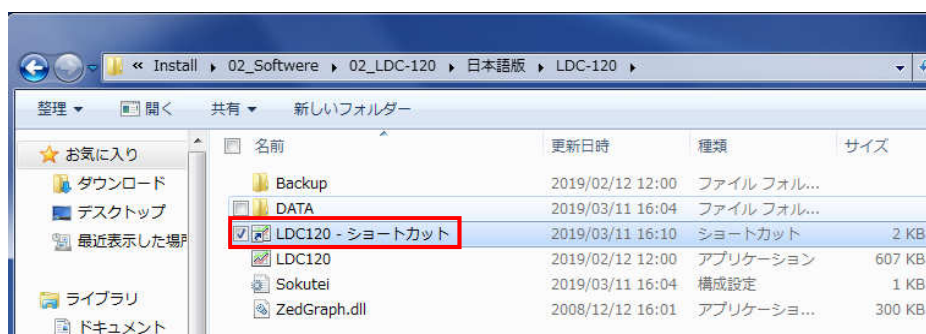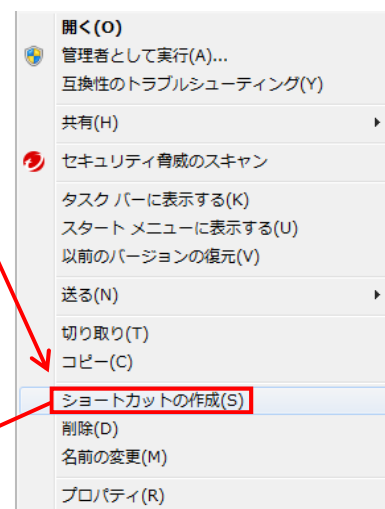

⑤作成した「LDC120-ショートカット」ファイルをドラッグさせてデスクトップ画面に貼りつけてください。

以上でLDC120管理ソフトのインストールは完了です。

口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書


※ソフトの保管場所への行き方はwindowsのバージョンによって少し違いますので、以下にバージョンごとの手順を示します。

・Windows7の場合

①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、左クリックして下記右の画面で「コンピューター」を左クリックして次の画面を開いてください。




②下記左画面の「ローカルディスク(C:)」をダブルクリックして下記右の画面を開き、「LDC-120」フォルダを貼りつけてください。

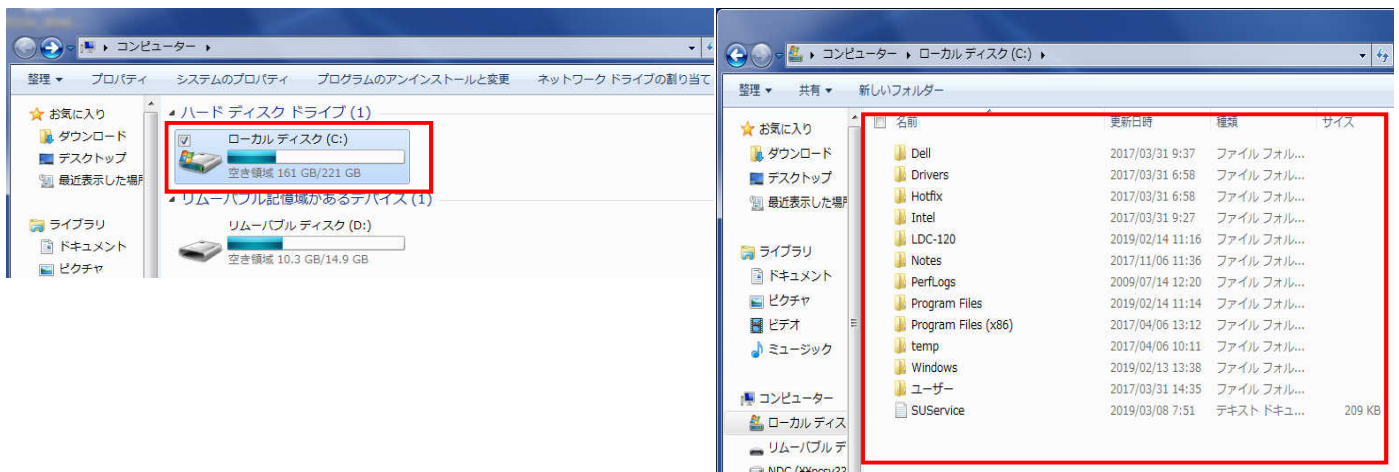


・Windows8の場合

①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、右クリックして下記右の画面で「エクスプローラー」を左クリックして次の画面を開いてください。

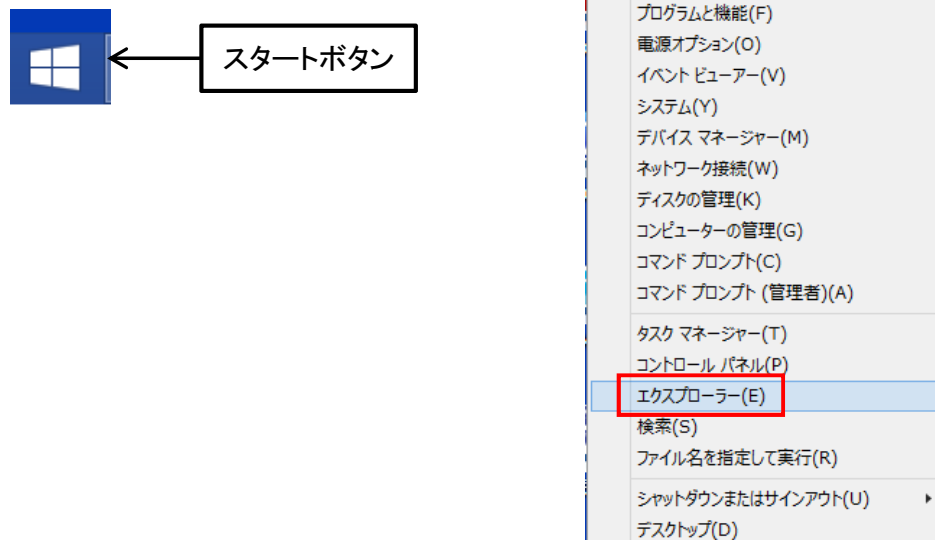




口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

②下記左画面の「OS (C:)」をダブルクリックして下記右の画面を開き、「LDC-120」フォルダを貼りつけてください。

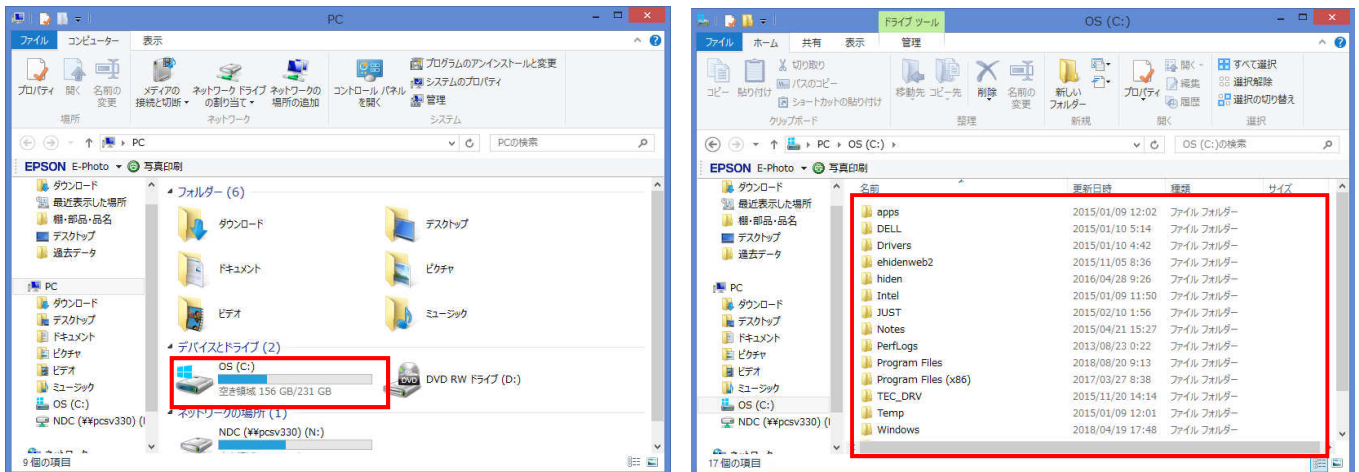

・Windows10の場合

- ①パソコン画面左下のスタートボタンを1回、右クリックして下記左の画面で「OS (C:)」を左クリックしてください。
下記右画面の「OS (C:)」をダブルクリックして下記右の画面を開き、「LDC-120」フォルダを貼りつけてください。

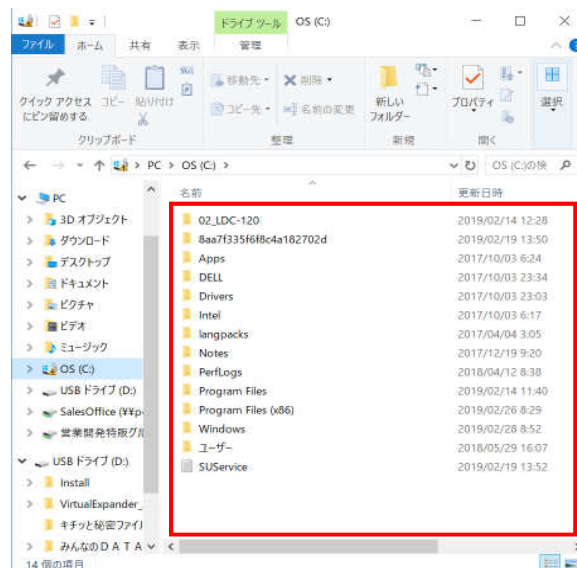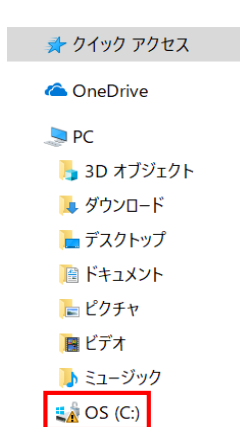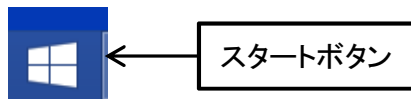

口唇閉鎖力測定器(リップデカム) LDC-120 ドライバー・データ管理ソフト インストール手順書

4.改版履歴

改 版 履 歴		
1	2019/02/12	A版
2	2019/04/17	B版 3.1.1項「Microsoft .NET Framework 4 Japanese dotNetFx40_Full_x86_x64」ファイルインストールのページを修正
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		